

ResMed

Dopasowanie maski AirFit N20 – przewodnik



- Rozpocznij od upewnienia się, że klipsy magnetyczne na dolnych paskach nie są zapięte.
- Jeśli są zapięte, należy je odłączyć, obracając i zdejmując z ramki.



- Załóż uprzęż przez głowę, upewniając się, że logo firmy ResMed jest skierowane na zewnątrz.



- Dolne paski ustaw tak, aby znajdowały się pod uszami.
- Ustaw magnesy w pobliżu odpowiednich zacisków na ramce.



- Dopasuj rzepy mocujące na paskach górnych do momentu, kiedy maska będzie ułożona równo i stabilnie.



- Powtórz czynność 4 z dolnymi paskami.



- Podłącz przewód powietrza urządzenia do kolanka, a następnie wciśnij kolanko z przodu maski do momentu kliknięcia.
- Uruchom urządzenie.

Dalsze instrukcje można znaleźć w podręczniku użytkownika.



Opcje dodatkowe


- Pacjent może umieścić dolną część upręży na włosach lub pod włosami, aby dopasować ją do fryzury.

Wskazówki dotyczące doboru rozmiaru

Maska AirFit N20 jest wyposażona w trzy wymienne rozmiary silikonu – mały, średni i duży. Modułowa budowa maski AirFit N20 oznacza, że każdy rozmiar silikonu można łatwo założyć na tę samą ramkę. Pozwala to na łatwiejszą wymianę silikonu.

Zalecamy posłużenie się szablonem rozmiarów, aby dowiedzieć się, jaki rozmiar będzie właściwy dla danego pacjenta.

Szablon można pobrać ze strony internetowej [ResMed.com/AirFitN20](https://www.ResMed.com/AirFitN20)

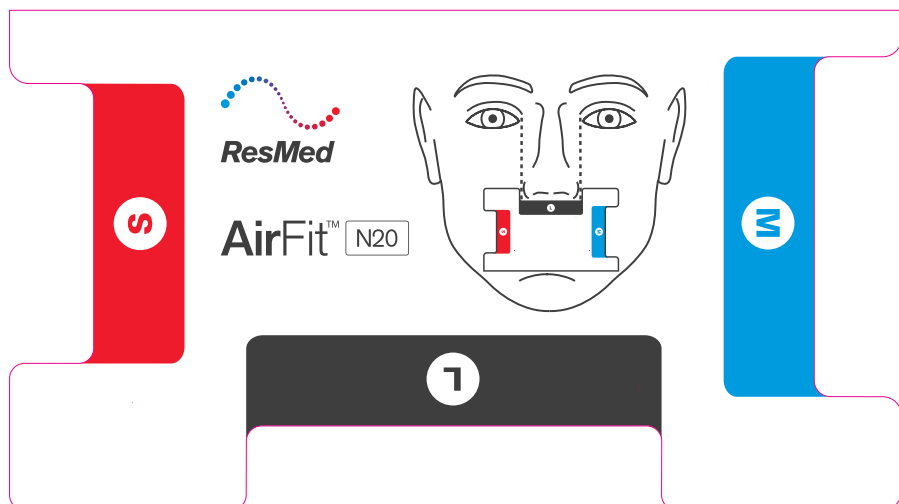

Kody produktów

	Europe 3
AirFit N20 for Her (dla niej): mała	63516
AirFit N20: mała	-
AirFit N20: średnia	63517
AirFit N20: duża	63518

Europe 3: angielski, bułgarski, czeski, grecki, węgierski, polski, portugalski, rumuński, hiszpański i turecki

