

Instrukcja obsługi

Urządzenie do ozonowania

Przed użyciem należy zapoznać się dokładnie z poniższą instrukcją obsługi urządzenia i przestrzegać instrukcji, aby właściwie korzystać z urządzenia.



Model nr: OD3-J01


Dziękujemy!

Dziękujemy za zakup naszego urządzenia do ozonowania - OD3-JO1, które stosuje się do zabijania zarasków i bakterii przy użyciu O₃. Można je wykorzystywać do sterylizacji urządzeń CPAP lub też do sterylizacji całego domu. Do wyboru są dwa tryby funkcjonowania w zależności od sytuacji. Ze względu na skuteczność O₃, sterylizacja nie wymaga użycia wody ani żadnego środka chemicznego.

Ostrzeżenie:

- * Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i nie pozwalać, aby się nim bawiły.
- * Zabrania się podejmowania próby naprawy lub rozmontowywania tego produktu, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- * Produkt należy trzymać z dala od wody i innych płynów w czasie jego użytkowania.
- * Nie używać produktu w środowisku zagrożonym wybuchem, w pobliżu łatwopalnych gazów czy innych palnych materiałów.
- * W przypadku nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia, należy upewnić się, że stosowany jest oryginalny zasilacz i kabel USB.

Opis produktu

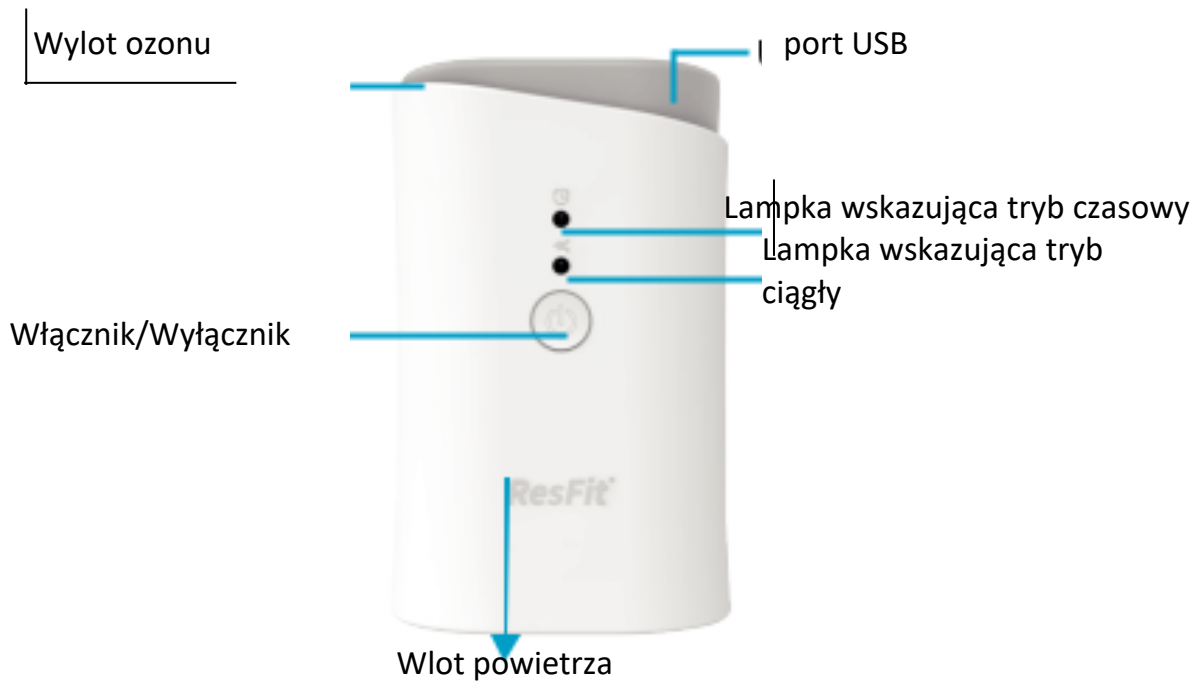

1. Zawartość zestawu



Urządzenie do sterylizacji ozonem




Zasilacz




Kabel USB

2. Instrukcja użytkownika

1. Uruchamianie

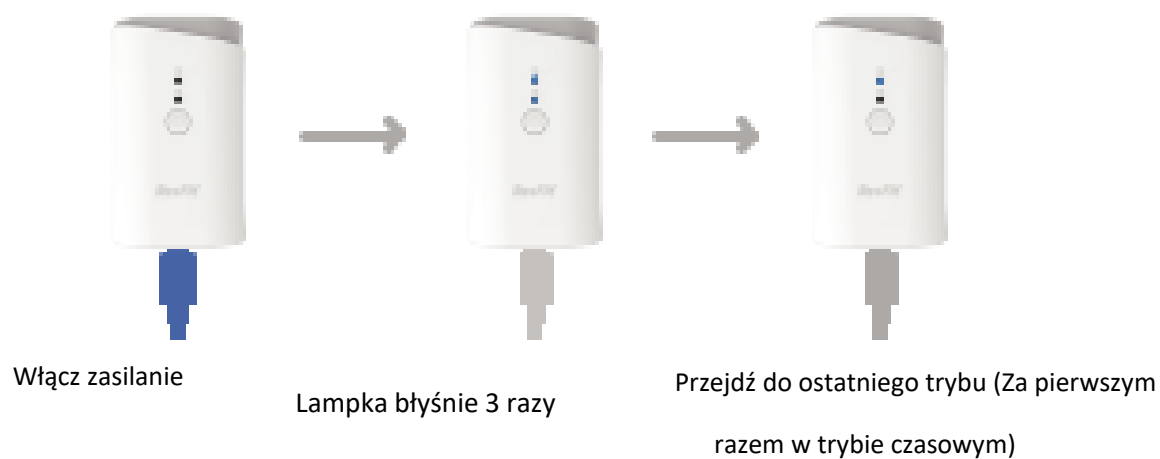

2. Zmiana trybu

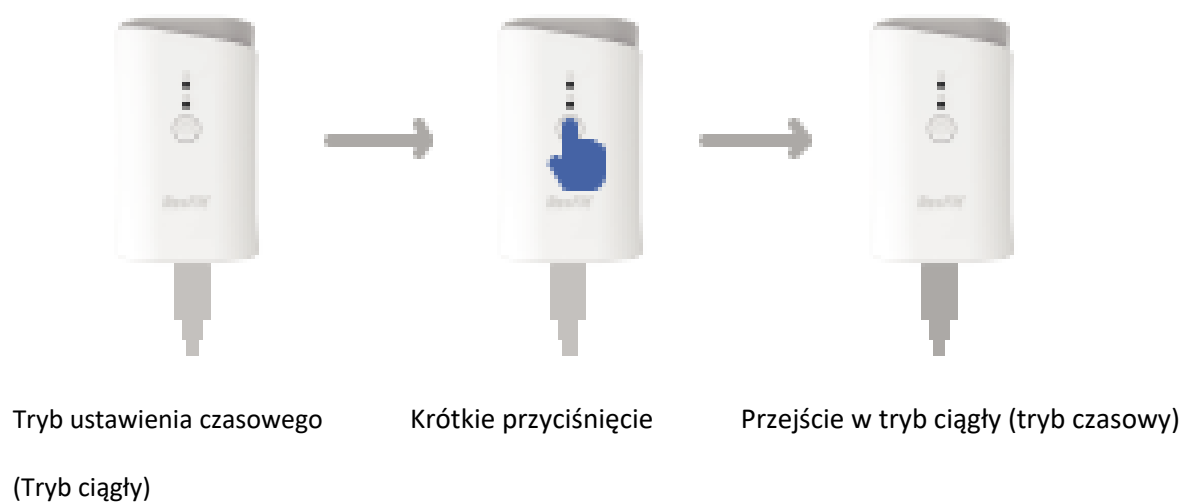

3. Wyłączanie urządzenia




Przytrzymaj długo włącznik/wyłącznik

Lampki błyskają.

Lampki gasną. Urządzenie
wyłącza się.

Wentylator działa przez 5
minut.

4. Ponowne uruchamianie

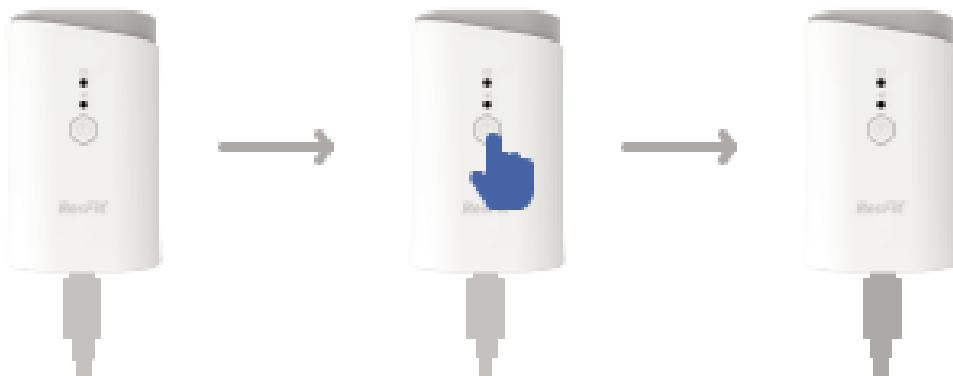


Urządzenie wyłączone

Krótkie naciśnięcie przycisku

Tryb czasowy

Tryb ustawienia czasowego

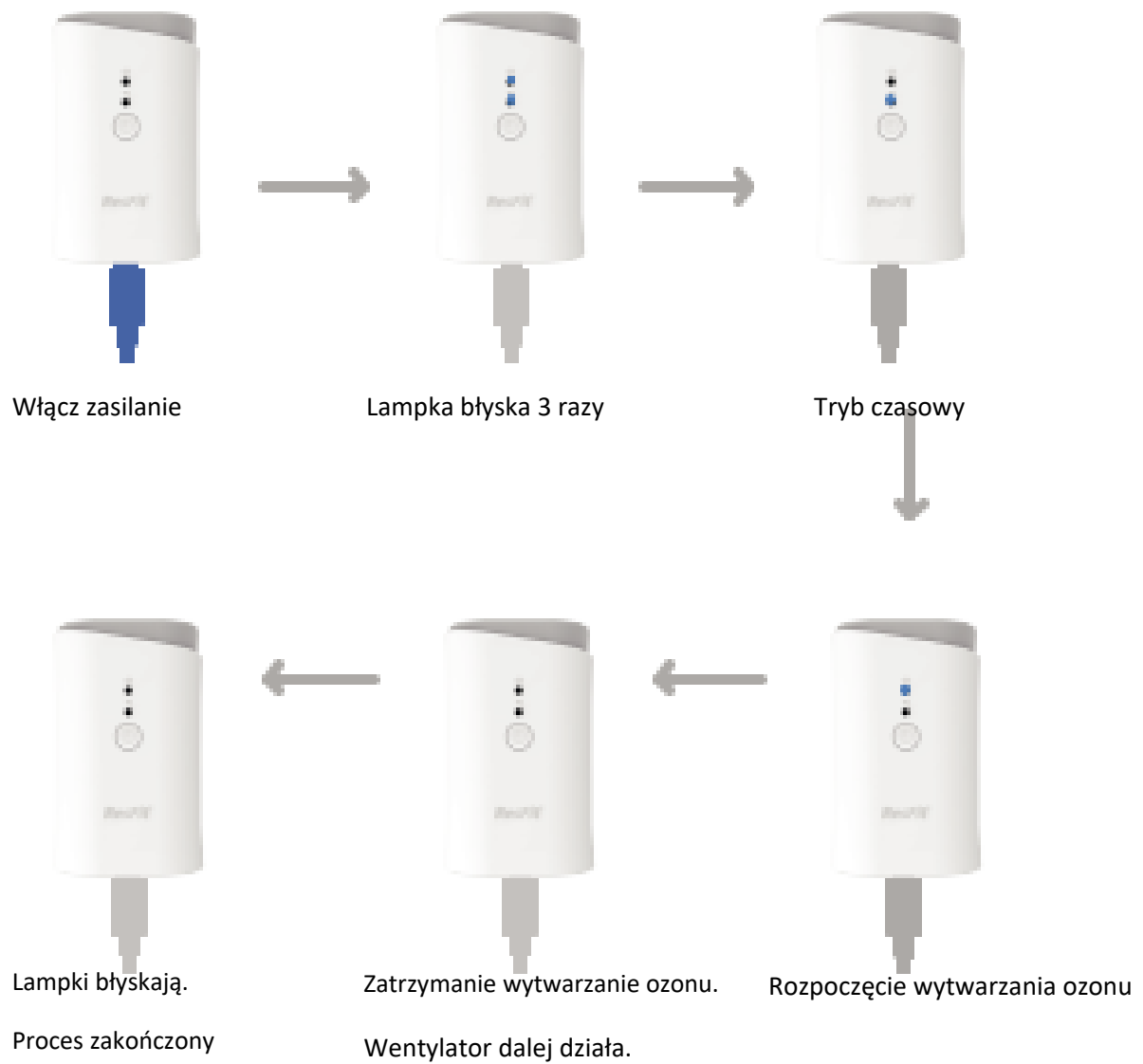

Stosowanie

1. Sterylizacja CPAP


(1) Podłącz OD3-JO1 do CPAP poprzez rurkę, wybierz Tryb czasowy lub Tryb ciągły, aby rozpocząć sterylizację.



Uwaga: w przypadku urządzenia CPAP skonfigurowanego z nawilżaczem przed rozpoczęciem sterylizacji należy osuszyć zbiornik z wodą.

(2) Czyszczenie maski i rurek

Umieść maskę i rurki w torebce do sterylizacji lub zamykanym pudle, podłącz OD3-JO1 poprzez rurkę, wybierz Tryb czasowy lub Tryb ciągły, aby rozpocząć proces sterylizacji.

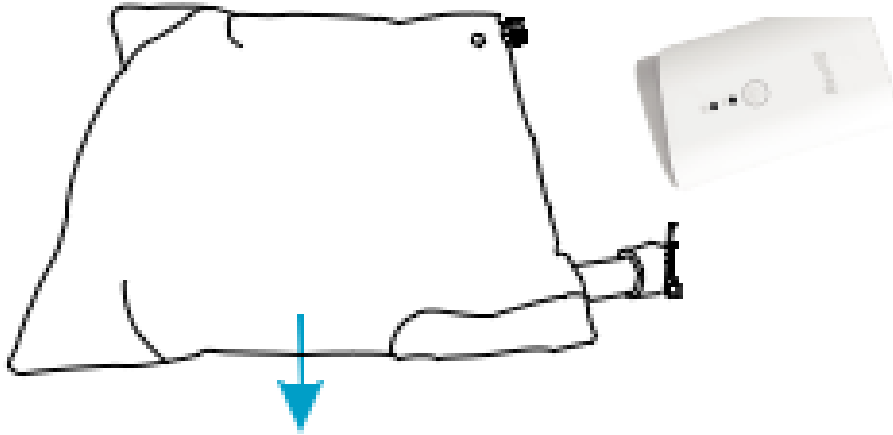

Maska w środku

Uwaga: Po zakończeniu sterylizacji należy odczekać godzinę przed użyciem urządzenia CPAP i maski aby mieć pewność, że nie zawierają pozostałości ozonu. Obszar dookoła oczyści się sam w ciągu kilku godzin.

2. Sterylizacja domu

a: Sypialnia lub pokój dzienny

Kiedy opuścisz już sypialnię lub pokój dzienny, umieść tam OD3-JO1, następnie wybierz Tryb przerywany lub Tryb czasowym, aby rozpocząć sterylizację.

b: Kuchnia

Gdy skończysz gotować i opuścisz kuchnię, umieść w niej OD3-JO1 i wybierz Tryb przerywany lub Tryb czasowy, aby rozpocząć sterylizację.

c: Łazienka

Umieść OD3-JO1 w łazience i zamknij drzwi. Wybierz Tryb przerywany lub Tryb czasowy, aby rozpocząć sterylizację.

Uwaga: Należy upewnić się, że nikogo nie ma w pomieszczeniu w trakcie sterylizacji. Należy przewietrzyć pomieszczenie po sterylizacji.

Dane techniczne

Wymiary: 101*64*44mm

Waga: 145g

Przepływ powietrza: 3.5CFM

Zużycie energii: 5W

Zasilanie: DC 4.5V~6.5V

Temperatura przechowywania: -20~+55°C


Temperatura pracy: -5~+45°C

Standardowa konserwacja

1. Jeżeli urządzenie OD3-JO1 nie jest używane przez dłuższy czas, należy utrzymywać je w czystości i umieścić w opakowaniu.
2. Nie wolno umieszczać urządzenia OD3-JO1 przez dłuższy czas w miejscu wilgotnym lub nasłonecznionym w wilgotnym miejscu, ani w miejscu wystawionym na słońce.
3. Kiedy urządzenie OD3-JO1 jest wykorzystywane do sterylizacji, należy umieścić je w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu.
4. Nie należy powodować pęknięć lub wgnieceń w urządzeniu OD3-JO1, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia jego elementów i znajdującej się wewnątrz elektroniki.
5. Należy utrzymywać urządzenie OD3-JO1 i torebkę do sterylizacji czyste od kurzu poprzez cykliczne przecieranie zwilżoną szmatką. Jeżeli torebka jest pobrudzona, można ją umyć ręcznie i pozostawić na powietrzu, aby wyschła. Do czyszczenia nie wolno używać pralki, nie wolno również suszyć w suszarce bębnowej lub innym urządzeniu.

W przypadku problemów technicznych

Problem	Rozwiązanie
OD3-JO1 nie działa po włączeniu	Należy podłączyć urządzenie OD3-JO1 do zasilacza. Należy podłączyć zasilacz do źródła prądu. Uruchomić urządzenie OD3-JO1.
Lampka nie pali się lub urządzenie nie wydaje sygnału dźwiękowego	Należy upewnić się, że zasilanie jest właściwie podłączone. Jeżeli problem wciąż występuje, należy przestać do naprawy.
W trybie czasowym, urządzenie OD3-JO1 nie zatrzymuje się po 35 minutach Po uruchomieniu urządzenie nie wytwarza się O ₃	Uruchom ponownie. Jeżeli problem wciąż występuje, należy przestać urządzenie do naprawy. Należy ponownie uruchomić urządzenie OD3-JO1. Jeżeli problem wciąż występuje, należy przestać urządzenie do naprawy.

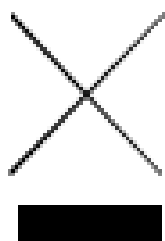

Niniejszy symbol oznacza, że na całym obszarze UE nie można wyrzucać tego produktu wraz z innymi domowymi odpadami. Aby zapobiec możliwej szkodzie dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającej z niekontrolowanej utylizacji odpadów, urządzenie należy poddać recyklingowi w sposób odpowiedzialny w celu promowania praktyki zrównoważonego ponownego wykorzystywania materiałów.

Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotów i odbioru, lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Sprzedawca będzie mógł wówczas przekazać produkt do recyklingu w sposób przyjazny dla środowiska.

Oczyść swoje
urządzenie CPAP

Oczyść swój dom

